

SIDE B

Slovensky	NAVOD NA POUŽITIE	50-058, 02/2010, REV5, 11/2021																												
SILIKÓNOVÉ TRUBIČKY PETERSIL C 0123																														
OPIS: Silikónové trubičky.																														
INDIKÁCIE: Odsávanie alebo prenos stratených tekutín.																														
ČINNOSTI Odrežte požadovanú dĺžku trubičky. V prípade potreby ju pred použitím sterilizujte.																														
OPATRENIA <u>Čistenie/dekontaminácia</u> - Výrobok nechajte 15 minút namočený v roztoku typu 0,5% AMPHOLYSINE PLUS (jedno 25 ml vrecko na 5 litrov studenej vody). - Vyčistite a opláchnite. <u>Sterilizácia</u> - Autoklávujte 18 minút pri teplote 134 °C. - Etylénoxid.																														
KONTRAINDIKÁCIE Žiadne známe kontraindikácie																														
EXSPIRÁCIA Dátum expirácie je sedem rokov od dátumu výroby. Maximálna teplota skladovania: 40 °C, minimálna teplota skladovania: 4 °C. Po použití zlikvidujte.																														
SYMBOLY POUŽITÉ NA OBALE																														
<table> <tr> <td></td><td>= Dátum použiteľnosti</td> <td></td><td>= Nepoužívajte, ak je poškodený obal</td> </tr> <tr> <td></td><td>= Kód šarže</td> <td></td><td>= Pozri návod na použitie</td> </tr> <tr> <td></td><td>= Referenčné číslo</td> <td></td><td>= Európsky zástupca</td> </tr> <tr> <td></td><td>= Upozornenie</td> <td></td><td>= Nesterilné</td> </tr> <tr> <td></td><td>= Dátum výroby</td> <td></td><td>= Chráňte pred slnečným žiarením</td> </tr> <tr> <td></td><td>Označenie CE. Produkt spĺňa základné požiadavky európskej smernice o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS</td> <td></td><td>= Uchovávajte v suchu</td> </tr> <tr> <td></td><td>= Teplotný limit</td> <td></td><td></td> </tr> </table>				= Dátum použiteľnosti		= Nepoužívajte, ak je poškodený obal		= Kód šarže		= Pozri návod na použitie		= Referenčné číslo		= Európsky zástupca		= Upozornenie		= Nesterilné		= Dátum výroby		= Chráňte pred slnečným žiarením		Označenie CE. Produkt spĺňa základné požiadavky európskej smernice o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS		= Uchovávajte v suchu		= Teplotný limit		
	= Dátum použiteľnosti		= Nepoužívajte, ak je poškodený obal																											
	= Kód šarže		= Pozri návod na použitie																											
	= Referenčné číslo		= Európsky zástupca																											
	= Upozornenie		= Nesterilné																											
	= Dátum výroby		= Chráňte pred slnečným žiarením																											
	Označenie CE. Produkt spĺňa základné požiadavky európskej smernice o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS		= Uchovávajte v suchu																											
	= Teplotný limit																													
Peters SURGICAL Distribuuovaný: PETERS SURGICAL – Immeuble AURELIUM – 1 Cours de l'Île Seguin – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE TEL.: +33 (0)1 48 10 62 62 FAX: +33 (0)1 48 91 22 99 E-MAIL: peters@peters-surgical.com Výrobca: Degania Silicone Ltd. Degania Bet, 1513000 Israel Európsky zástupca: Biometrix S.R.O., Vicenzy 16, Samorin 93101 - Slovakia																														

297X210
PRINTING COLOR: BLACK